

SOLUTION NETTOYANTE DÉSINFECTANTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN MILIEU DENTAIRE

DENTASEPT® SH PRO

SOLUTION DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE

Solution détergente désinfectante prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux en milieu dentaire.

Combine une efficacité à large spectre, des temps de contact courts avec une excellente compatibilité matériaux et les propriétés d'un nettoyant doux.

Les caractéristiques du DENTASEPT SH PRO permettent une utilisation sur un grand nombre de dispositifs médicaux. Utilisé dans les conditions pratiques comme prévu dans vos protocoles, le produit permet d'atteindre le niveau de conformité obligatoire pour une désinfection efficace afin de limiter la propagation des agents pathogènes.

- Compatible avec les matériaux sensibles à l'alcool
- Bonnes propriétés moussantes
- Formule efficace sans ingrédients inutiles (sans parfum ni colorant)
- Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre



DENTASEPT® SH PRO

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables en milieu dentaire

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES


- Nettoie et désinfecte en 1 seule opération
- Sans alcool, sans parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé
- Dispenseur de mousse compacte afin de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants (750 ml)
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas...)
- Mousse dense pour une meilleure adhérence aux surfaces (750 ml)
- pH 6

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi.




Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer.

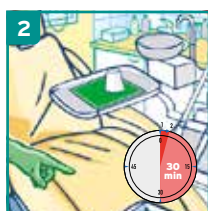

Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.



Le rinçage est inutile sauf pour les zones destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses.

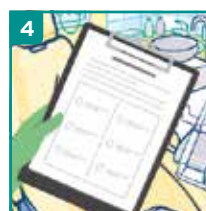

Veillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux. Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉS/CONDITIONS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide - Actif selon : EN 16615* (2 min), EN 13727* (1 min)	2 min
Levuricide - Actif selon : EN 13624*, EN 16615*	2 min
Tuberculocide - Actif selon : EN 14348*	60 min
Actif sur les virus enveloppés - Actif selon : EN 14476*	1 min
Actif sur Polyomavirus SV 40 - Actif selon : EN 14476	5 min
Actif sur Rotavirus - Actif selon : EN 14476*	30 sec
Virucide à spectre limité selon - Actif selon : EN 14476*	30 min
Adenovirus	30 min
Norovirus (MNV)	15 min

* Conditions de saleté.

INFORMATIONS

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES
Dentasept SH Pro	12 x 750 ml	2462326
Dentasept SH Pro	1 bidon de 5L	2462042



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

INDICATIONS

Solution nettoyante désinfectante en milieu dentaire:

- Entre deux patients : nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergeables et non-invasifs.
- Avant les étapes de nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs médicaux (Par exemple, les pièces à main rotatives, turbines, contre-angles), et selon les indications du fabricant : enveloppement en vue de leur transport vers la stérilisation et/ou essuyage.

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi.

- 1) Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer.
- 2) Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- 3) Le rinçage est inutile sauf pour les zones destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses.
- 4) Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux. Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

COMPOSITION

Chlorure de didécyl-diméthylammonium, excipients.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes de DENTASEPT SH PRO est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage entre +5°C et +25°C.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Please read label and product information.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



www.anios.com