


Plus Wipes Unisepta®

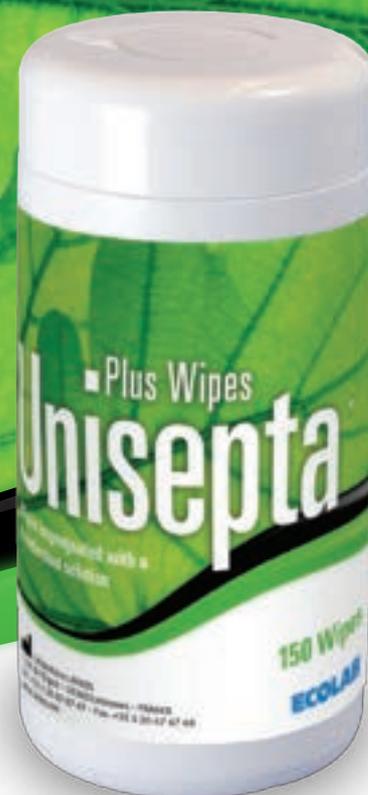

Lingettes prêtes à l'emploi imprégnées d'une solution désinfectante, à action rapide, pour le traitement des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (exemples: unit dentaire, corps de lampe à photo polymériser...).

Caractéristiques principales

- A base d'éthanol
- Temps de contact : 30 secondes
- Parfum frais de citron
- Ne laissent ni trace ni tache grasse
- Idéales pour une utilisation entre deux patients
- Dimensions : 130 x 190mm

Plus Wipes Unisepta®

Protocole d'utilisation

Avant utilisation

Porter des gants appropriés.


Vérifier avant application la compatibilité des surfaces traitées avec l'alcool.



1 Retirer la lingette en tirant horizontalement et séparer en tirant d'un coup sec.



2 Appliquer la lingette désinfectante sur la zone préalablement nettoyée, en utilisant autant de lingettes que nécessaire.

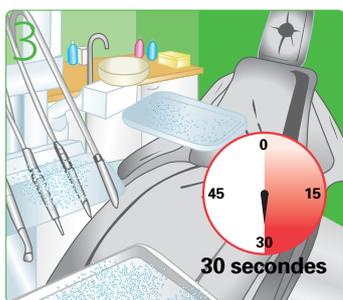

3 Laisser la solution agir pendant 30 secondes minimum. Rincer abondamment à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit.




4 Veiller à ce que la boîte soit bien refermée après chaque utilisation.

Précautions

Dangereux : respecter les précautions d'emploi (établies conformément à la réglementation européenne en matière de classification et étiquetage des produits chimiques). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit. Conserver entre +5°C et +25°C. Usage professionnel uniquement. Dispositif médical CE 0459.

Spectre d'activité**

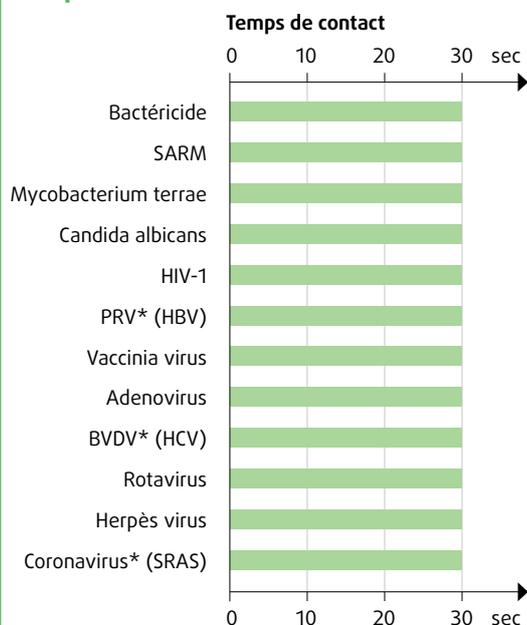

* PRV : Virus modèle de l'Hépatite B

* BVDV : Virus modèle de l'Hépatite C

* Coronavirus : Virus modèle du SRAS

** Spectre d'activité de la solution d'imprégnation

Conforme aux normes européennes

Lingettes bactéricides et levuricides selon EN 16615.

La solution d'imprégnation est :

Bactéricide : EN 13727

SARM : EN 13727

Levuricide : EN 13624

Tuberculocide : EN 14348

Actif sur virus selon EN 14476

Composition

100 g de la solution d'imprégnation contiennent : Ethanol (55 g), propionate de didécylmethyl oxyéthylammonium (0.11 g), parfum de synthèse, excipients.

Données physiques

Couleur : Lingette blanche

Parfum : Citron

Conservation : 3 ans (non ouvert)

Utiliser dans les 3 mois après ouverture

Emballage : PEHD recyclable

Conditionnement

	150 lingettes
Boîte	✓
Recharge	✓